


# TOSI Gebrauchsanleitung

Überprüfung der Reinigungsleistung von Waschdesinfektionsautomaten.

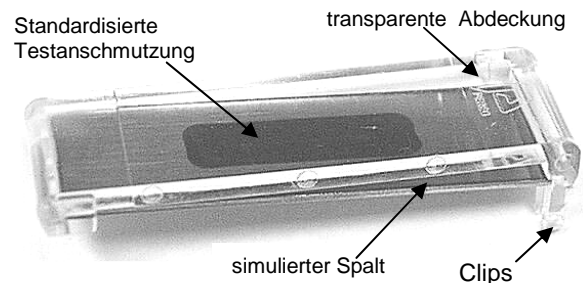

1. Für den Routinetest oder die Reinigungsvalidierung werden die TOSI's flach in die einzelnen Siebschalen eingeklipst. Genaue Informationen zur Durchführung entnehmen Sie bitte der **Reinigungskontrollanleitung**.
2. TOSI muß sicher in die Siebschalen eingeklickt werden um ein Herausspülen zu vermeiden
3. Das gewünschte Programm wird gestartet
4. Nach Programmende werden die TOSI's entfernt und optisch auf Sauberkeit überprüft. Ein positives Ergebnis wird durch vollständig gereinigte TOSI's angezeigt
5. Die Ergebnisse werden in das **TOSI Logbuch** eingetragen
6. Der **TOSI troubleshooting guide** hilft bei unbefriedigenden Ergebnissen

Lagerung: In Schutzhülle bei 2°C bis 25°C lagern  
Vor Hitze und Licht schützen  
Haltbar bis: Siehe Aufdruck

Inhalt: 12 Tests