



TOSI® – FlexiCheck Troubleshooting Guide

| | |
|---|---|
|  | <p>Positives Ergebnis: Beide Testanschmutzungen vollständig entfernt.</p> |
|  | <p>Ergebnis: Polysaccharide entfernt / Sichtbare Fibrinreste. Anzeichen für: Parameter der Proteinentfernung mangelhaft Optimierung: Überprüfen und/oder verbessern von: Reinigungszeit/ -temperatur, Reinigerdosierung/-typ.</p> |
|  | <p>Ergebnis: Polysaccharidreste sichtbar / Blutanschmutzung entfernt. Anzeichen für: Parameter der Polysaccharidentfernung mangelhaft. Optimierung: Überprüfen und/oder Verbessern von: Wasserqualität / Reinigungszeit und Temperatur, Reinigerdosierung und -typ.</p> |
|  | <p>Ergebnis: Polysaccharide entfernt / Rote Proteinreste sichtbar. Anzeichen für: Denaturierungseffekte (Hitze oder Desinfektionsmittel) Optimierung: Überprüfung auf zu hohe Reinigungstemperaturen oder Desinfektionsmittel im Reinigungsschritt, wenn möglich eine kalte Vorspülung fahren.</p> |
|  | <p>Ergebnis: Polysaccharid und Blutanschmutzung vollständig erhalten. Anzeichen für: Fehlender Durchfluß /Keinerlei Reinigungswirkung. Optimierung: Überprüfung der FlexiCheck-Verbindung, der Maschine und des Programms</p> |