

## Gebrauchsanleitung

# SonoCheck

Überprüfung der Ultraschallenergie mit SonoCheck.



1. Für den Routinetest oder die Validierung des Ultraschallbeckens wird SonoCheck in den Instrumentenkorb eingelegt. Die genaue Durchführung des Funktionstests und des Routinetests entnehmen Sie bitte der **Reinigungskontrollanleitung**.
2. Das empfohlene Reinigungsprogramm des Bades wird gestartet.
3. Nach Programmende wird der Instrumentenkorb entfernt und SonoCheck wird auf Farbänderung blaugrün/gelb überprüft. INFO: Hohe Ultraschallenergie kann nach dem Farbumschlag zur Entfärbung der SonoCheck-Tests führen.
4. Die für den Farbumschlag nötige Zeit liefert zusätzlich Information über die Ultraschallenergie.
5. Das Ergebnis wird in das **SonoCheck Logbuch** eingetragen.
6. Der **Troubleshooting Guide** hilft bei unbefriedigendem Ergebnis.

Info: Wegen der hohen Temperatur während der Trocknung soll SonoCheck nicht in Waschdesinfektionsautomaten eingesetzt werden.

LAGERUNG: Bei 2°C - 25°C in der SonoCheck-Box aufbewahren  
Vor Licht und Hitze schützen

HALTBARKEIT: Siehe Aufdruck

INHALT: 30 Tests

**Vertrieb:**

**Hersteller:**  
PEREG GMBH  
Porschestr. 12  
D-84478 Waldkraiburg  
Germany